



Siemens Explorer

Guide pour les parents

www.siemens-audiologie.fr

SIEMENS



Nos enfants sont reliés au monde grâce aux sons
qui les entourent.

Ils éveillent leur curiosité et les invitent à la
découverte.

Explorer™ redonne de la vie aux sons.

Pour que les enfants profitent pleinement de chaque
instant et découvrent les joies de communiquer.



Explorer 500
Taille réelle



7 astuces pour aider votre enfant à comprendre les sons

- Proposez d'abord des règles simples de communication. Par un geste (agitez la main par exemple), signalez à votre enfant que vous commencez à lui parler. Ce signal attirera rapidement son attention et l'aidera à mieux se concentrer sur les sons et les mots.
- Créez des « impressions auditives » qui vont stimuler l'apprentissage de votre enfant. Parlez de tout ce que vous faites. Commentez ce que fait votre enfant. Décrivez verbalement ce qui se passe autour de vous.
- Aidez votre enfant à écouter les différents sons. Expliquez-lui ce qu'il entend et la relation des sons avec les événements.
- Formulez des phrases courtes, structurées et simples. Répétez, parlez clairement et lentement.
- Regardez votre enfant et incitez-le à vous regarder pendant que vous lui parlez. Il est souvent plus facile pour les enfants malentendants de comprendre les mots quand ils voient les expressions faciales de leur interlocuteur.
- Montrez beaucoup de tendresse et de confiance par des gestes rassurants quand vous parlez à votre enfant.
- Encouragez votre enfant à parler. Ne l'interrompez pas, même si vous savez déjà ce qu'il va dire.

Avec le concours de la Fédération Nationale des Orthophonistes.

Aidez vos enfants à explorer de nouveaux mondes.

Votre enfant souffre d'une perte de l'audition ? Sachez que vous n'êtes pas seuls. De nombreux parents, comme vous, sont exposés à ce même défi. Grâce aux nouvelles solutions auditives, comme Explorer de Siemens, vous pouvez aider votre enfant à faire face à cette situation. Avec votre patience, votre amour et l'appareillage adapté, votre enfant pourra découvrir le monde des sons et de la communication orale.

Comprendre la perte auditive

Il y a différentes causes et différents types de pertes auditives. Il est important de comprendre que chaque enfant est unique. Une solution qui conviendrait à l'un n'est pas forcément adaptée à un autre. Des tests et des mesures spécifiques, réalisés par le médecin, permettent de déterminer le type de perte et la solution requise. Vous pourrez ensuite choisir avec l'audioprothésiste le meilleur appareillage pour votre enfant.


Conseil et soutien

Une fois que votre enfant est équipé de ses aides auditives, une période d'adaptation peut être nécessaire. Parallèlement à une rééducation auditive assurée par un orthophoniste, votre audioprothésiste vous accompagnera. Ensemble, ils apporteront, à votre enfant et aux membres de votre famille, les meilleurs conseils. Parlez avec des parents d'enfants qui souffrent également d'une perte auditive. Ils vivent la même expérience que vous et peuvent partager des avis intéressants.

Choisir les meilleurs appareils auditifs

Siemens propose Explorer, une aide auditive spécialement développée pour les enfants. Impliquez votre enfant dans le processus de décision. Explorer existe en de nombreuses couleurs, parmi lesquelles votre enfant pourra choisir celle qu'il préfère.



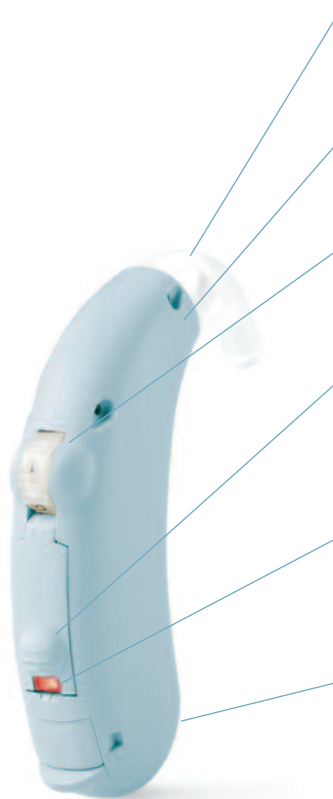

Coude solidement fixé

Le coude pédiatrique est facile à fixer, mais très difficile à retirer. Les bébés ne risquent donc pas de le défaire.

Protégé contre l'humidité et la saleté

nanoProtect repousse la saleté et l'humidité pour éviter l'oxydation.

Potentiomètre programmable avec fonction OFF

Le potentiomètre transparent, avec cran d'arrêt, indique visuellement le niveau du volume.

Bouton poussoir programmable


Le bouton poussoir programmable permet d'accéder du bout des doigts aux différents programmes (maison, plein air, musique, ...).

Indicateur de statut lumineux (LED)

Le voyant indique l'état de l'appareil. Il permet ainsi aux parents ou aux enseignants de vérifier que l'aide auditive fonctionne sans la retirer de l'oreille de l'enfant.

Sécurité enfants sur tiroir pile

La fermeture sécurisée du tiroir pile résiste à des forces de 25 Newton, équivalant à une pression de plus de 2 kilos sur le tiroir pile. Il est quasiment impossible pour les enfants de l'ouvrir.

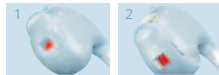

1. Broche métallique renforçant la fermeture.
2. Emplacement dans le boîtier pour verrouiller et déverrouiller le tiroir pile.

Sabot audio

Le sabot audio permet une connexion directe au signal. Il est compatible avec la plupart des systèmes FM et délivre un excellent rapport signal sur bruit. Pour mieux apprendre à l'école et à la maison ...



- 1 – Ouvrez le tiroir pile
- 2 – Soulevez le cache de l'entrée audio et fermez le tiroir pile
- 3 – Placez les contacts dorés du sabot audio contre ceux de l'entrée audio d'Explorer et tournez le sabot audio jusqu'au clic qui garantit qu'il est bien en place
- 4 – Pour retirer le sabot audio, tournez le dans le sens inverse et fermez le cache de l'entrée audio d'Explorer



Une solution. Plusieurs utilisations

Explorer de Siemens est une solution auditive spécialement développée pour l'appareillage des enfants.

Doté des dernières technologies, Explorer est l'aide auditive idéale pour les nourrissons, les enfants et les adolescents.

Explorer résiste à toute épreuve

Equippé d'un maximum de sécurités, Explorer est la plus sûre des solutions pour enfants.

Grâce à un traitement de surface, le boîtier d'Explorer est protégé contre l'humidité et les projections d'eau. Le boîtier, robuste, protège l'appareil en cas de mauvaise chute.

Explorer est également doté d'une sécurité au niveau du tiroir pile, qui empêche les enfants de retirer la pile accidentellement, de la perdre ou de l'avaler.

Chaque Explorer est livré avec un petit coude, spécialement conçu pour les bébés et les enfants. Il est simple à fixer mais difficile à retirer. Les plus jeunes ne peuvent pas le défaire.

Le bouton poussoir d'Explorer permet d'accéder aux différents programmes.

Recouvert d'un cache arrondi, ce bouton ne peut être mordu ou mâché par les bébés.

Conçu pour durer en affrontant la curiosité des petits, Explorer est prêt pour l'extrême, tel que l'école ou le jardin d'enfants.

Explorer évolue avec les enfants

Les études démontrent que les aides auditives contribuent à l'acquisition du langage et à la perception de la parole chez les enfants souffrant de troubles de l'audition. Explorer dispose d'une Entrée Audio Directe (EAD) avec fonction « d'activation vocale du mode FM », d'un système de détection automatique des situations et d'un Traitement de la Parole et du Bruit, spécialement développés pour aider les enfants à l'école.

Suffisamment flexible pour s'adapter aux différentes attentes d'enfants qui grandissent, assez souple pour répondre aux besoins des plus petits, Explorer donne aux jeunes la possibilité d'explorer le monde à tous les stades de la jeunesse.




Aide auditive, et plus encore...



L'adolescence a soif d'indépendance. Avec Tek™, en option, les adolescents apprécieront la liberté d'un environnement sans fil. Tek transmet le signal, en son stéréo, depuis les téléphones portables, les lecteurs MP3, la télévision, et d'autres sources sonores, directement dans les aides auditives.

Grâce à Tek, les adolescents profitent d'une connectivité sans fil sur une distance de 10 mètres. Tek donne aux adolescents le pouvoir de transformer leurs aides auditives en un véritable casque stéréo haute performance et adapté sur mesure. Ils ne font plus qu'un avec leur monde.

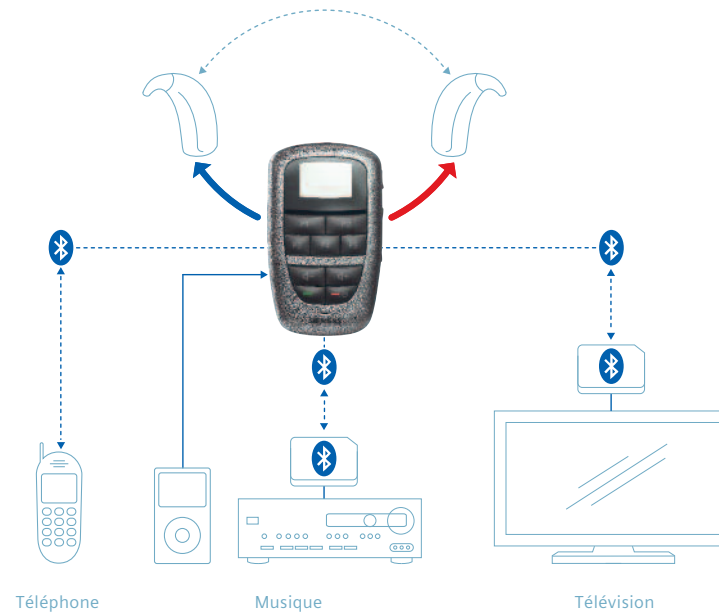

Tek permet à l'utilisateur averti de contrôler son environnement sonore, du bout des doigts et de rester ainsi connecté au monde. Sans fil.



Le kit enfant contient tout le nécessaire pour prendre soin des aides auditives : un outil de nettoyage, une poire asséchante, un stéthoscope, un testeur de piles. Enfin, pour enregistrer des fichiers MP3 ou les devoirs d'école, le kit inclut une clé USB.



Les enfants, libres d'explorer.

Insouciants et joyeux, ils inventent des sons et ont des idées inédites. Leur imagination encourage l'inspiration. Ce sont vos enfants.

Les explorateurs de demain. Maintenant, avec Explorer, ils peuvent entendre et comprendre tout le monde.

Un choix arc en ciel.

Le boîtier d'Explorer peut être personnalisé avec 16 couleurs différentes.





Un album d'autocollants aux couleurs vives et aux formes ludiques à coller sur l'aide auditive est proposé avec Explorer. Les enfants peuvent ainsi personnaliser leurs aides auditives Explorer avec des super héros, des ballons de football ou des fleurs. Ils peuvent à leur guise choisir parmi 40 visuels.



Mieux communiquer pour mieux profiter de la vie.

Siemens, soyez exigeants !

Avec Explorer



Les informations de ce document contiennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent être modifiées sans préavis.

Les dispositifs requis seront adaptés par l'audioprothésiste pour chaque cas individuel de chaque malentendant pendant les réglages individualisés et au moment de la délivrance des produits.

Réf. FDOC 3172. Juillet 2008.
Imprimé en France - H.B. Graphic

Siemens Audiologie France
B.P. 40
93201 SAINT DENIS Cedex

www.siemens-audiologie.fr